

---

# Soft Cleanser (150 ml)



Prix du produit :

**9,90 €**

Description brève du produit :

Pour nettoyer la surface adhérente de vos prothèses

Description du produit :

Pour nettoyer la surface adhérente de vos prothèses, et des mamelons et également pour l'entretien de toutes les prothèses en gel silicone

Conçue à l'origine pour le nettoyage, Soft Cleanser ne contient aucune substance à base d'huile et n'altère pas la face adhérente. Sans PEG ou dérivés, sans colorant, sans paraben. Pour une meilleure adhérence, utiliser quotidiennement l'Amoena Soft Cleanser et sa brosse souple spécifique.

**Important** – l'entretien de la surface adhérente par étape :

1. Répartir quelques gouttes de Cleansing Lotion sur la surface adhérente encore sèche.
2. Humidifiez la brosse avec de l'eau. Brossez fermement toute la surface adhérente, environ 2 à 3 minutes, en effectuant des mouvements circulaires.
3. Important : rincez abondamment à l'eau tiède, presque chaude.
4. Laissez sécher à l'air libre .

150 ml

Galerie de produits :

---



**Attributs du produit :**

Contenance: 150 ML